



TREDI

MANUALE

NORMATIVA DI UTILIZZO

Le montature da vista della collezione TREDI, a marchio SBARBATOO, sono dispositivi medici di classe I – regola 1 Capo III dell'allegato VII del regolamento (UE) 2017/7/45 – il cui uso principale è l'associazione a lenti oftalmiche di prescrizione per la correzione dei difetti visivi.

Le montature da vista sono conformi al regolamento (UE) 2017/7/45.

Non si può escludere che soggetti particolarmente sensibili o allergici possano manifestare reazioni avverse per contatto con i materiali e i trattamenti utilizzati per le montature. In caso di reazioni di ipersensibilità cutanea consultare un medico.

La montatura viene fornita con lenti di presentazione che non sono destinate all'uso, ma solo a mantenere la forma dell'occhiale e a consentirne una prova fedele al prodotto finito.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

Le montature da vista vanno conservate nella propria custodia a una temperatura compresa tra i -10°C e i +35°C.

Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (per esempio, il cruscotto dell'auto). Tali temperature possono deformare le montature e alterarne la funzionalità.

In caso di contatto occasionale con agenti (quali: acqua salata, acqua clorata, cosmetici, lacca per capelli, creme e repellenti per insetti) si consiglia la rimozione immediata con un panno morbido umidito.

In caso di usura o rottura si consigliano solo ed esclusivamente ricambi originali.

Per la pulizia, usare un panno umido e un normale detergente neutro testato precedentemente su una piccola zona nascosta della montatura. Asciugare con un panno morbido pulito.

Evitare l'impiego di solventi come alcool, acetone e altri detergenti chimici aggressivi che possono intaccare l'estetica e la funzionalità della montatura.

SMALTIMENTO

Secondo la norma vigente.
Frontali, aste e lenti: indifferenziato.
Cerniere metalliche: raccolta differenziata.

MARCATURA

L'identificativo del modello (nome, colore, dimensioni) si trova all'interno dell'asta della montatura.

FABBRICANTE

OTTICA GALUZZI di Valsecchi Marco
Corso Lodi, 1 – 20135 Milano – ITALIA.

PROGETTAZIONE

Marco Decio.

ASSISTENZA E CONTATTI

Per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza, rivolgersi direttamente al punto vendita in cui è stata acquistata la montatura.

In alternativa, scrivere all'indirizzo:
info@otticagaluzzi.it